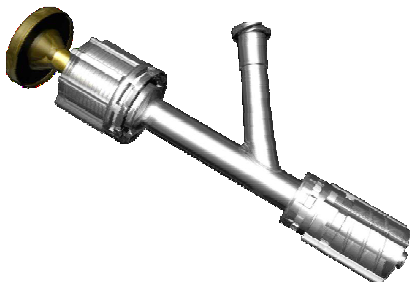
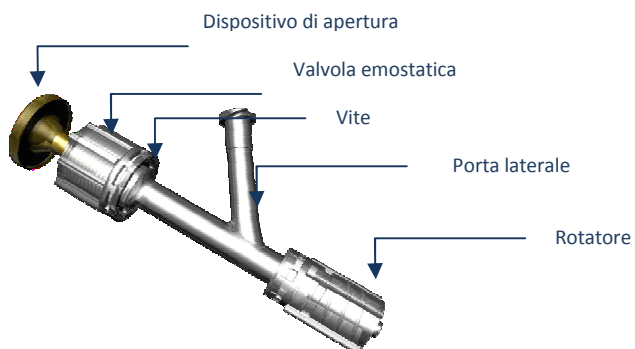


Scheda Tecnica Connettore a Y – Okay II

Nome Commerciale:
Destinazione d'uso:
Produttore:
Distributore esclusivo Italia:

Okay II
Connettore a Y
GOODMAN CO.,LTD.
KARDIA S.R.L - Via Luigi Rizzo 8\1, Milano

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p>Immagine del prodotto</p> |  |
| <p>Caratteristiche</p> | <p>Il connettore a Y OKAY II è una valvola di controllo del reflusso ematico con le seguenti caratteristiche:</p>  <p>Spingendo il dispositivo di apertura in direzione della valvola emostatica si apre il dispositivo, mentre tirandolo nella direzione opposta lo si chiude. Spingendo il dispositivo di apertura e ruotandolo in senso orario, si blocca il dispositivo in posizione aperta. Quando la valvola emostatica è chiusa, la perdita ematica durante la manipolazione del catetere è mantenuta al minimo.</p> <p>Ruotando la vite a destra, la valvola si chiude, mentre ruotandola a sinistra si apre. Quando la valvola fissa è in posizione chiusa, si può bloccare il catetere in posizione ed è possibile introdurre il mezzo di contrasto o la soluzione del farmaco.</p> <p>La struttura del connettore consente di ridurre al minimo la perdita ematica durante le procedure di Ptca\Pta</p> <p>Diametro Interno (I.D.): 10 Fr (3,33 mm) Massima pressione sostenuta: 700 psi</p> |

| | |
|---|--|
| | <p><u>Materiali di fabbricazione:</u> OKAY II : Polycarbonate Valvola: Silicone</p> |
| Contenuto della confezione | <ul style="list-style-type: none"> • Connettore a Y • Introduuttore • Torquer |
| Modalità di confezionamento | <p>Il prodotto è confezionato singolarmente. Prima della spedizione, il prodotto è stato sottoposto a sterilizzazione a gas con ossido di etilene secondo le normative EN 550:1994, EN ISO 10993-7:1995 Durata della sterilizzazione: 3 anni La sterilizzazione non è garantita se la confezione non è integra. Utilizzare immediatamente l'apertura della confezione. Prodotto monouso non risterilizzabile.</p> |
| Modalità di conservazione | <p>Non conservare il prodotto piegato e/o sotto peso eccessivo. Il prodotto va conservato lontano dall'acqua. Riporre al buio, in luogo fresco ed asciutto.</p> |
| Modalità di smaltimento | <p>Verificare le indicazioni dettate dalle normative italiane inerenti lo smaltimento dei dispositivi medici</p> |
| Modalità d'impiego e controindicazioni | <p>Fare riferimento alle istruzioni per l'uso del prodotto.</p> |

Ente certificatore: 0120 SGS
 Classe di appartenenza: II Classe 2B
 Certificato CE: JP09/040230
 CND: C010480
 Iscrizione a repertorio: 660527

CODICI E CARATTERISTICHE TECNICHE

| Codice | Diametro Interno |
|--------|------------------|
| YOK0A | 10 Fr |